

# AirSim Child Combo X

## Manual de usuario

---



Código del producto: CC10006X

Dimensiones: 40 x 24 x 22 cm

Peso: 2,6 kg

### Contenido del paquete:

- 1 AirSim Child Combo X (montado y listo para su uso)
- 1 maletín negro
- 1 pen drive USB manual de usuario
- 1 bote de lubricante
- 1 juego de bolsa del pulmón de niño
- 5 piezas de laringe (1 en el maniquí y 4 de repuesto)
- 1 piel del cuello envolvente (suministrada en el maniquí)

### Antes de empezar:

- Fije el maniquí a una superficie adecuada ajustando el tornillo a las ventosas (la superficie no debe ser porosa para asegurar una succión suficiente).
- Asegúrese de que la cabeza esté en la posición correcta y que pueda mover el maniquí a la posición de inhalación para la laringoscopia directa al girar la cabeza. La cabeza permanecerá en la posición de inhalación.
- Compruebe que la cantidad de aire en la lengua es suficiente, que se puede inflar o desinflar con una jeringa para ajustar la dificultad durante la intubación.

- Compruebe que las bolsas del pulmón y del estómago estén conectadas a la vía aérea y al esófago.
- Rocíe cantidades generosas de lubricante en la vía aérea y en el equipo.
- Ya está listo para utilizar el maniquí.

**El AirSim Child Combo X es ideal para practicar una variedad de técnicas entre las que se encuentran:**

- Cricotiroidotomía con aguja y quirúrgica.
- Traqueostomía percutánea.
- Intubación nasotraqueal doble.
- Técnicas de ventilación con bolsa y mascarilla.
- Gama completa de dispositivos supraglóticos.
- Laringoscopia directa.
- Inserción del tubo endotraqueal.
- Examen real con fibra óptica.
- Inserción del Combitubo.
- Videolaringoscopia (incluida la maniobra de Sellick).
- Técnicas de inserción de la sonda nasogástrica.


**Recomendamos los siguientes tamaños de material para un rendimiento óptimo:**

- De 4,5 a 5 mm ID para la intubación nasal.
- De 5,5 a 6 mm ID para la intubación oral.
- El tamaño 2 para las mascarillas laríngeas LMA.
- El tamaño 2 para las espátulas de laringoscopia.
- Tamaños respectivos similares para otros dispositivos supraglóticos.

**Guía de consumible:**

***Sustitución de la laringe:***

Para sustituir la laringe, primero debe comprobar que la cabeza esté en posición neutral. Quite la piel del cuello y la laringe. Al insertar la nueva laringe, utilice las muescas resaltadas en la imagen inferior para fijarla en su sitio.

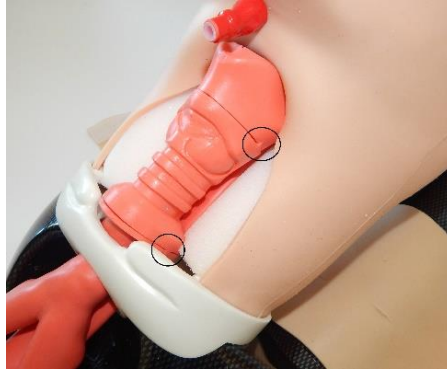

Cuando sustituya la piel del cuello, asegúrese de que el modelo esté en posición neutral para permitir que la piel se apoye mejor en el producto.

### Cuidado y mantenimiento

Almacenar en un lugar limpio y seco alejado del calor y de la luz solar directa. Evitar el contacto con metales, disolventes, aceites o grasas y detergentes fuertes. Cuando no esté utilizando el producto, guárdelo en el maletín negro que se le ha suministrado.

Lave bien la vía aérea AirSim con agua tibia. Utilice agua con jabón o algo similar hasta que todos los materiales extraños y residuos visibles sean eliminados.

Se pueden usar detergentes suaves o productos de limpieza enzimáticos en la vía aérea de acuerdo con las instrucciones del fabricante y con la dilución adecuada. El detergente no debe contener irritantes de la piel ni de las mucosas.

*Por favor, no utilice ninguno de los siguientes productos cuando limpie la gama de productos AirSim:*

- Germicidas, desinfectantes o productos químicos como el glutaraldehído (ej.: Cidex®).
- Óxido de etileno, detergentes a base de fenol o que contengan yodo.

### Garantía

TruCorp garantiza que este dispositivo no tiene defectos de materiales ni de mano de obra y que prestará un servicio satisfactorio por un período de un año a partir de la fecha de entrega. Esto asegura que nuestros clientes reciban la máxima cobertura con cada producto. Si el dispositivo no funciona correctamente, debe devolverse a la fábrica para su evaluación. Si el dispositivo se encuentra defectuoso al ser examinado por TruCorp, este será reparado o reemplazado sin coste alguno.

Además, TruCorp proporciona una garantía de cinco años (hasta cinco años de protección y cobertura) para las vías aéreas de la marca TruCorp en cualquier gama de AirSim X y Trauma X. La garantía de cinco años solo cubre la vía aérea actual de TruCorp y no cualquier otra parte del modelo.

TruCorp pagará el transporte y la entrega, así como las piezas necesarias concretas sin coste alguno en el caso de que alguna parte del producto falle dentro del período de un año. TruCorp pagará el transporte y la entrega de la vía aérea TruCorp sin coste alguno en el caso de que la vía aérea falle dentro del período de cinco años.

No obstante, esta garantía quedará ANULADA si el dispositivo muestra evidencias de haber sido manipulado o de haber sido dañado por un calor excesivo, el uso de instrumentos afilados, el uso indebido u otras condiciones de operación fuera del control de TruCorp. Las partes que se desgasten o se dañen por un mal uso no estarán garantizadas y se cobrarán si la reparación ha sido aprobada. La garantía quedará anulada si se ve que los productos de terceros han dañado o causado fallos en los modelos de TruCorp.

Por favor, dirija todas sus consultas y solicitudes de garantía y reparación a:



TruCorp Ltd  
33 Waringstown Road  
Lurgan, Co. Armagh  
BT667HH  
Northern Ireland



Tel: +44 (0) 28 38882714

Email: [info@trucorp.com](mailto:info@trucorp.com)



true training  
true anatomy  
true to life