

TruCric

Manual de usuario



Código del producto: TCRIC1

Dimensiones: 40 x 24 x 22 cm

Peso: 2 kg

Contenido del paquete:

- 1 maletín negro
- 1 pen drive USB manual de usuario
- 1 bote de lubricante
- 1 juego de bolsa del pulmón de adulto
- 10 piezas de laringe (1 en el maniquí y 9 de repuesto)
- 2 pieles del cuello envolventes (1 en el maniquí y 1 de repuesto)
- 1 alfombrilla antideslizante

Antes de empezar:

- Fije el modelo a una superficie adecuada ajustando el tornillo a las ventosas (la superficie no debe ser porosa para asegurar una succión suficiente).
- Si se utiliza en una superficie no apta para las ventosas, demande la alfombrilla antideslizante proporcionada para evitar que el producto se deslice durante su uso.
- Compruebe que la bolsa del pulmón esté conectada al tubo de la vía aérea.
- Verifique que la laringe esté en la posición correcta con la piel asegurada en su sitio.
- Rocíe cantidades generosas de lubricante en el equipo en todo momento para asegurar la eficiencia del producto.
- Ya está listo para utilizar el maniquí.

El TruCric es ideal para practicar técnicas quirúrgicas de la vía aérea entre las que se encuentran:

- Cricotiroidotomía con aguja y quirúrgica.
- Traqueostomía percutánea.
- Ventilación jet.

Guía de consumible:

Sustitución de la laringe:

Quite la piel del cuello y la laringe. Al insertar la nueva laringe, utilice las muescas del maniquí para fijarla en su sitio.



Cuando sustituya la piel del cuello, asegúrese de que pasa a través de los espacios predefinidos en la base y que la piel descansa sobre la laringe para darle una definición prominente.

Cuidado y mantenimiento

Almacenar en un lugar limpio y seco alejado del calor y de la luz solar directa. Evitar el contacto con metales, disolventes, aceites o grasas y detergentes fuertes. Cuando no esté utilizando el producto, guárdelo en el maletín negro que se le ha suministrado.

Lave bien la zona del cuello con agua tibia. Utilice agua con jabón o algo similar hasta que todos los materiales extraños y residuos visibles sean eliminados.

Se pueden usar detergentes suaves o productos de limpieza enzimáticos en la vía aérea de acuerdo con las instrucciones del fabricante y con la dilución adecuada. El detergente no debe contener irritantes de la piel ni de las mucosas.

Por favor, no utilice ninguno de los siguientes productos cuando limpie la gama de productos AirSim:

- Germicidas, desinfectantes o productos químicos como el glutaraldehído (ej.: Cidex®).
- Óxido de etileno, detergentes a base de fenol o que contengan yodo.

Garantía

TruCorp garantiza que este dispositivo no tiene defectos de materiales ni de mano de obra y que prestará un servicio satisfactorio por un período de un año a partir de la fecha de entrega.

Esto asegura que nuestros clientes reciban la máxima cobertura con cada producto. Si el dispositivo no funciona correctamente, debe devolverse a la fábrica para su evaluación. Si el dispositivo se encuentra defectuoso al ser examinado por TruCorp, este será reparado o reemplazado sin coste alguno.

No obstante, esta garantía quedará ANULADA si el dispositivo muestra evidencias de haber sido manipulado o de haber sido dañado por un calor excesivo, el uso de instrumentos afilados, el uso indebido u otras condiciones de operación fuera del control de TruCorp. Las partes que se desgasten o se dañen por un mal uso no estarán garantizadas y se cobrarán si la reparación ha sido aprobada.

Por favor, dirija todas sus consultas y solicitudes de garantía y reparación a:



TruCorp Ltd
33 Waringstown Road
Lurgan, Co. Armagh
BT667HH
Northern Ireland



Tel: +44 (0) 28 38882714

Email: info@trucorp.com



true training
true anatomy
true to life